

Installatiehandleiding Sanmedi badbuddy

Voor installatie:

Controleer het product

Neem direct contact op met uw leverancier indien blijkt dat de badbuddy beschadigd is tijdens het transport.

Controleer de inhoud van de doos

- gebogen handgreep met bevestigingsrosetten
- opstapje

Note:

Draai de handgreep ten opzichte van het opstapje dusdanig dat de greep geschikt is voor links- of rechtshandig gebruik.

De badbuddy is ontworpen voor baden met een maximum breedte van 900 mm, de greep is maximaal in te stellen op een lengte van 925 mm. Deze 25 mm tussenruimte is noodzakelijk om beschadigingen aan het bad te voorkomen.

Bij baden die smaller zijn dan 900 mm kan de buis ingekort worden. Verwijder de muurroset, kort de buis in, herplaats de roset en bevestig deze met 2 schroeven. Houdt ook hier de ruimte aan van 25 mm om beschadigingen te voorkomen.

Installatie

Zorg voor passend bevestigingsmateriaal geschikt voor de muur en vloer waar de Sanmedi badbuddy aan wordt gemonteerd (bevestigingsmateriaal niet meegeleverd)

1. controleer of de vloer en muur waar de greep aan bevestigd wordt vlak zijn en waterpas.
2. verwijder de verpakking.
3. verwijder de grote bouten zodat de greep en het opstapje in de juiste positie gedraaid kunnen worden en plaats de bouten weer om het geheel veilig vast te zetten. Niet te strak aandraaien.
4. zet de greep op de juiste plek, controleer of beide rosetten vlak tegen het oppervlak aanliggen en teken de boorgaten af. Boor de gaten: 2 aan de wand, 4 op de vloer
5. bevestig de bouten (gebruik RVS bouten, minimaal M8)

Schoonmaken

Gebruik standaard badkamer schoonmaakmiddelen, geen agressieve-, schurende- of zuurhoudende middelen.

Onderhoud

De Sanmedi badbuddy is ontworpen om jarenlang onderhoudsvrij te kunnen gebruiken.

Bij gebruik van de badbuddy in een chloorrijke omgeving wordt het aangeraden om jaarlijks het bevestigingsmateriaal te controleren omdat RVS aangetast wordt door chloor. Indien noodzakelijk: vervang de bouten door nieuwe voor uw veiligheid.