


Swing wastafel 40-41130

Inclusief eenhendelmengkraan 40-41010
en flexibele aan- en afvoerset

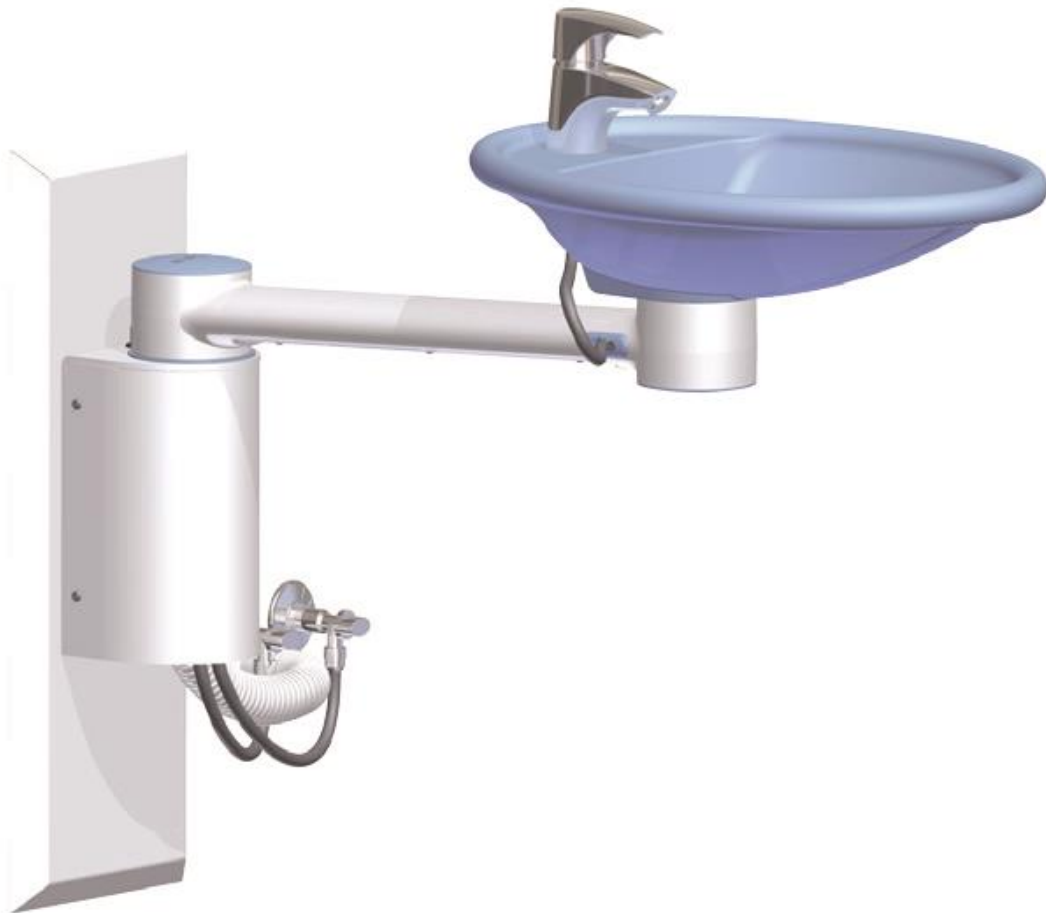

Installatiehandleiding



Dit product heeft een CE keurmerk en is daarmee in overeenkomst met de basis eisen betreffende functionaliteitseisen en veiligheid. Alle modellen van de Ropox wastafelunits zijn vervaardigd volgens de vereiste eisen onder nr. 93/42/EEC betreffende Medische Eisen en vallen onder de klasse 1; laagste risico

Installatie dient altijd door een vakbekwaam installateur te geschieden**VÒÒR INSTALLATIE:**

Controleer voor plaatsing of alle onderdelen zijn meegeleverd en de onderdelen op mogelijke beschadiging.

In geval van beschadigingen niet installeren, maar per omgaande / dezelfde dag bij uw leverancier schriftelijk melden. Zonder bewijs van schriftelijke melding kan geen vervanging / omwisseling plaatsvinden.

Introductie:

De Swing wastafel kan naar de gebruiker toegedraaid worden waardoor deze de handen kan wassen voor het opstaan van het toilet. Dit werkt hygiëne verhogend, is een voordeel voor de zelfredzaamheid en creëert meer ruimte voor een hulpverlener.

De Swing wastafel is ontworpen voor betere werkbare condities, deze kan niet worden gebruikt als steun.

De Swing wastafel is gemaakt voor gebruik binnenshuis, voor kamertemperatuur en vocht in sectie 3 (veiligheidsnormen voor badkamers).

Veiligheid:

De Swing wastafel mag alleen gebruikt worden door personen die het gebruik begrijpen
Gebruik de wastafel altijd dusdanig dat het risico wordt uitgesloten van beschadiging aan de omgeving of personen

Gebruik de wastafel niet indien deze beschadigd is

Gebruik de wastafel niet om op te leunen, steunen of zitten

Aanpassingen aan de wastafel die van invloed zijn op het gebruik zijn niet toegestaan

Installatie, service en reparaties dienen uitgevoerd te worden door geschoold personeel

Garantie vervalt indien de wastafel niet gemonteerd is volgens deze montagehandleiding

Onderhoud:**Schoonmaken**

Gebruik standaard badkamer schoonmaakmiddelen, geen agressieve-, schurende- of zuurhoudende middelen.

Onderhoud

De Swing wastafel is ontworpen om jarenlang onderhoudsvrij te kunnen gebruiken.

Controleer jaarlijks of de bouten veilig zijn aangedraaid

Controleer of de wastafel en arm vrij kunnen draaien



Technische gegevens:

Materiaal: gezand aluminium frame
 polyurethaan wastafel
 RVS buis
 diverse kunststof onderdelen



Oppervlakte behandeling: poeder coating

Temperatuur: 5 - 45° C

Voorbeelden :

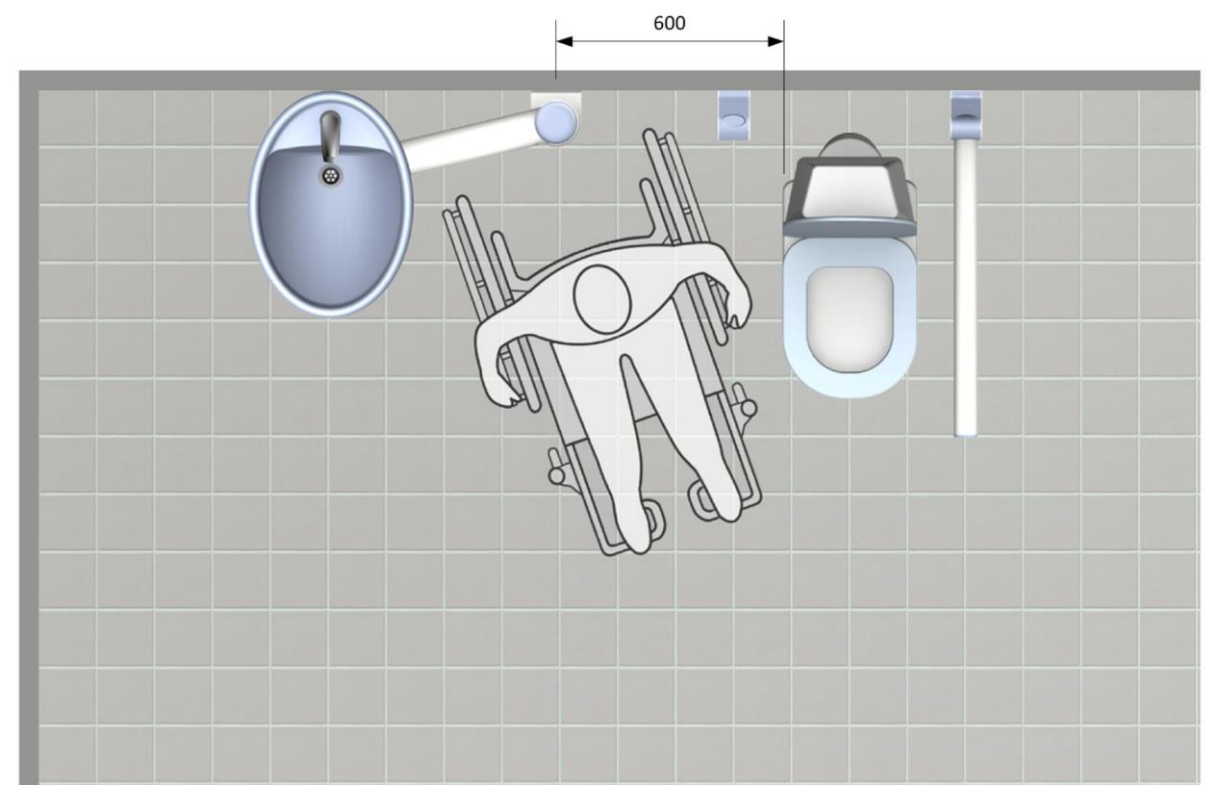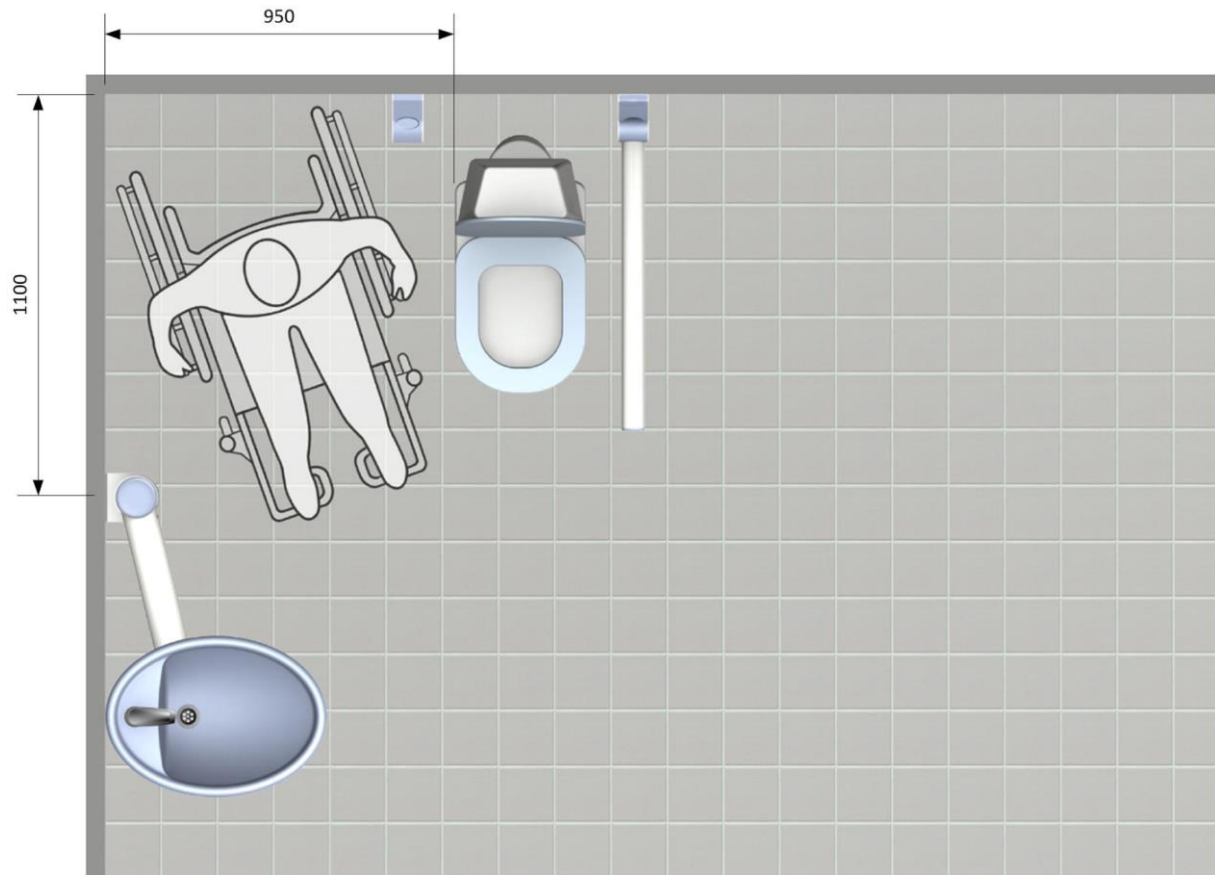

Maatvoering:

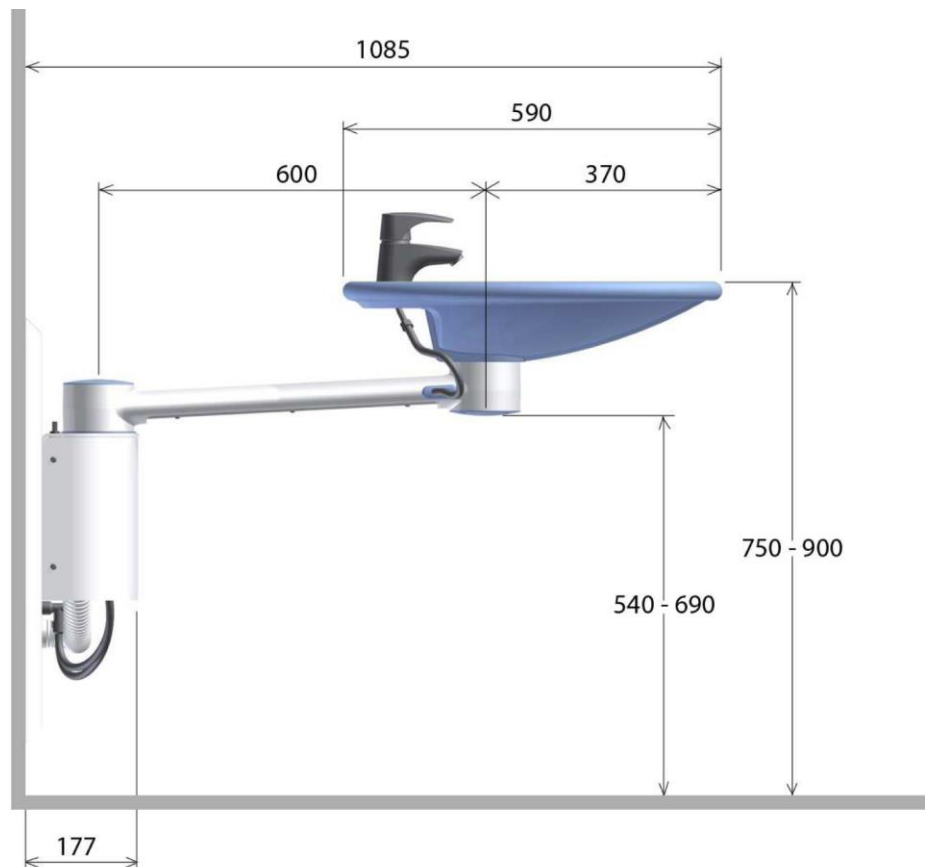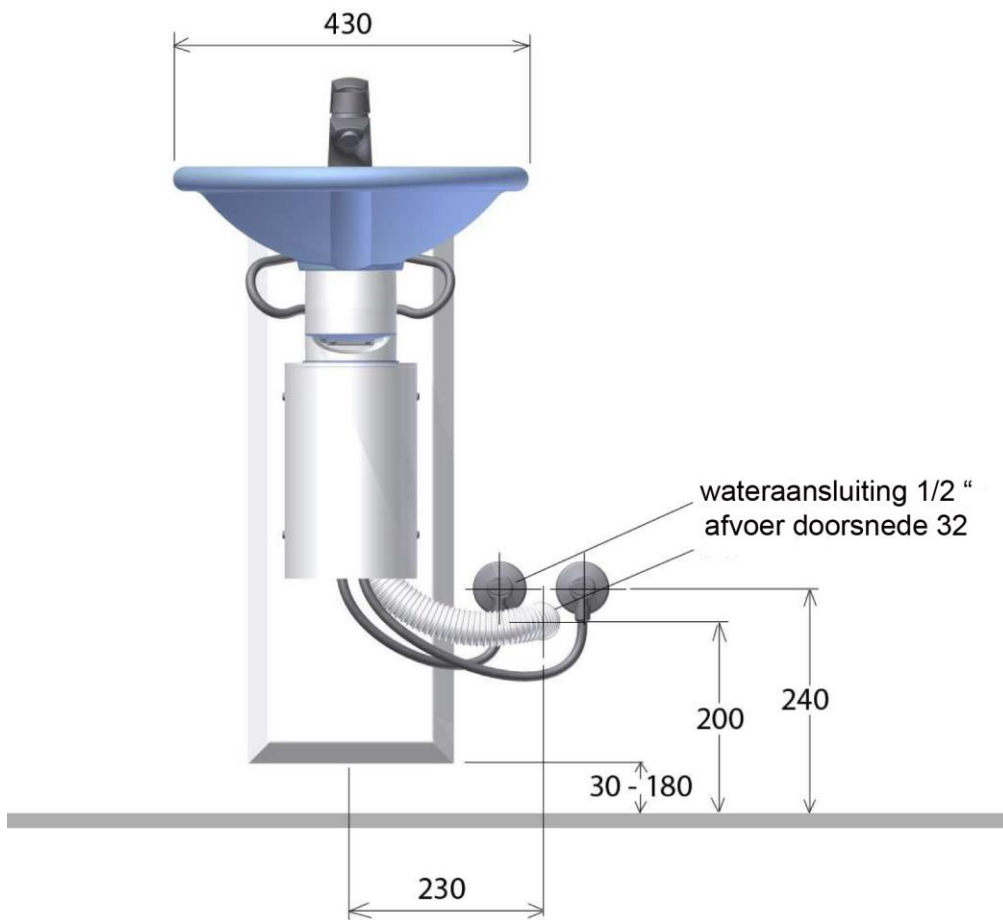

Onderdelen:



Installatie:

