


Sanmedi kiepspiegelgarnituur montagehandleiding

MONTAGEHANDLEIDING SPIEGEL-KIEPGARNITUUR SA-103

Door toepassing van dit garnituur kan de spiegel in verschillende standen schuin gezet worden. Hierdoor is de spiegel ook bruikbaar voor rolstoelgebruikers, max. spiegelgrootte 500 x 700 mm.

Materiaal: Aluminium

1. Bepaal de hoogte van de spiegel.
2. Monteer één houder met de bijgeleverde schroeven en pluggen.
3. Bepaal de plaats van de andere houder (breedte spiegel) en monteer deze.
4. Schuif de spiegel in de houders en klem deze vast met de bijgeleverde klemstroken.
5. Door het los- of vastdraaien van de moeren is de remwerking van het draaipunt in te stellen.
6. Bevestig het aluminium handgreepje aan de zijkant of bovenkant van de spiegel met behulp van het kunststof stelschroefje.

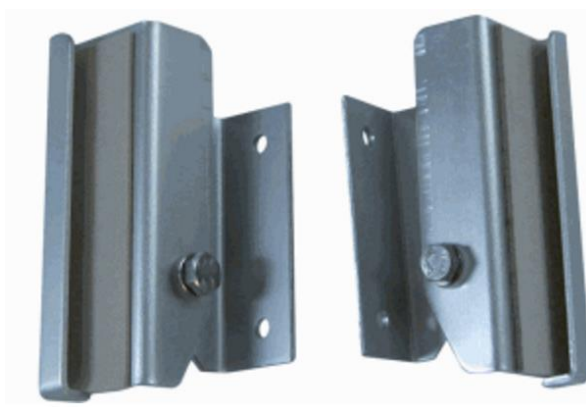

Vervaardigd van aluminium, compleet met bovenhandgreep, nylon pluggen en messing schroeven