





Het verzorgen van een stoma vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Om de stomadrager daarbij behulpzaam te zijn, is een comfortabele stomatoilettafel ontworpen. Deze wastafel vereenvoudigt de verzorging van de stoma en biedt optimale hygiëne.

Comfortabel

Onder uiterst hygiënische omstandigheden kan de stomadrager rustig de nodige handelingen verrichten, zoals het legen van het zakje, het verwisselen van de plak en het spoelen. Om het zicht op de stoma te vergemakkelijken, biedt het gebruik van de schaarspiegel een oplossing.

Voor wie?

De stomatoilettafel is speciaal ontwikkeld voor colon-, ileo- en uro-stomadragers. Vooral voor stomadragers die spoelen, biedt de wastafel een geheel nieuwe, moderne methode van verzorging.

Bij individueel gebruik wordt de hoogte van de stomatoilettafel aangepast aan de lengte van de gebruiker. De bovenkant van de wastafel hangt dan ongeveer 10 cm onder de stoma. Voor algemene ruimten, zoals in ziekenhuizen, is de standaardhoogte 80 tot 85 cm.



Ergonomisch

De stomatoilettafel is ergonomisch vormgegeven. De voorzijde sluit optimaal aan bij het lichaam en is enigszins verlaagd en naar binnen gebogen. De rand aan de voorzijde is versmald, zodat het stomazakje makkelijk in de spoelbak kan hangen.

De stomatoilettafel is uitgevoerd in zeer glad, witgekleurd kunststof materiaal (A.B.S. met toplaag) dat warm aanvoelt. De éénhendel mengkraan is voorzien van een uittrekbare handdouche, die onder andere voor het schoonmaken kan worden gebruikt. De spiegel is schuin geplaatst, zodat de stoma eenvoudig is te controleren. De krachtige randwaterspoeling zorgt ervoor dat alle fecaliën direct worden weggespoeld.




Waar?


De stomatoilettafel kan op iedere plaats geïnstalleerd worden waar aan- en afvoer is van water. Zowel bij de stomadrager thuis, in kantoren en instellingen waar stomadragers werkzaam zijn, als in openbare gebouwen, zoals stomaklinieken, ziekenhuizen, bejaardenoorden, verpleeg- en verzorgingshuizen.

Subsidie

De stomatoilettafel komt in aanmerking voor de subsidieregeling in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Aanvraagformulieren en verdere informatie omtrent het indienen van de aanvraag zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis of stadskantoor.

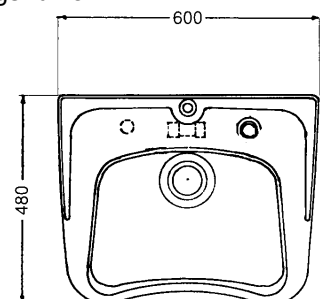

Stomatoilettafel met boveninlaat

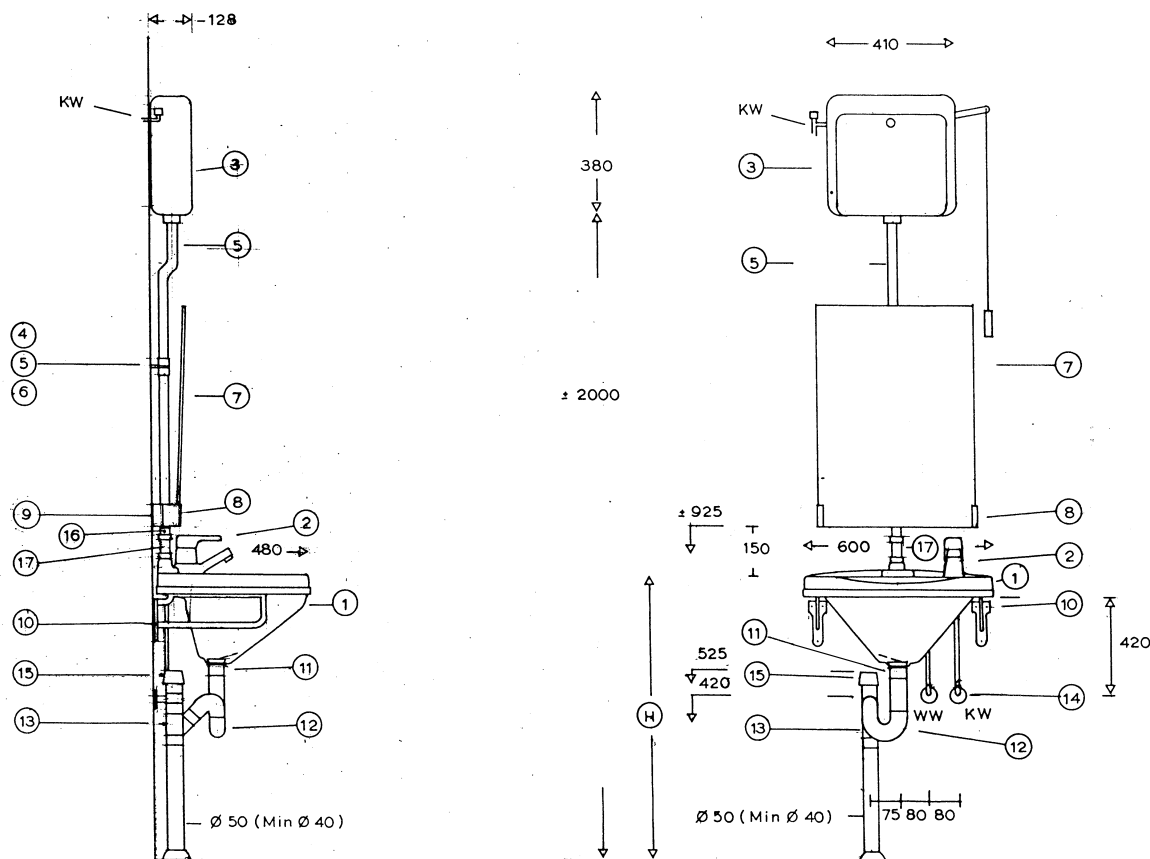

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Stomatoilet kunststof A.B.S. met toplaag, glad oppervlak dik 3mm, met boveninlaat en randspoeling 2. Eénhendel mengkraan 1/2" met doorstroombegrenzer en uittrekbare handdouche 3. Hooghangend reservoir met trekkoordbediening 4. Verchroomde sok rond 32mm t.b.v. de valpijp 5. Valpijp 2-delig rond 32mm 6. Valpijpbeugel 7. Spiegel rechthoekig 500x700mm 8. Kiep-spiegelgarnituur 9. 2 Vulblokjes 70x30mm, dik 15mm | <ol style="list-style-type: none"> 10. Een stel consoles, wit gelakt aluminium, lang 345mm 11. Kunststof plug 2", zonder rooster, zwart 12. Kunststof buissifon 2" en schuifbuis 2" 13. T-stuk met 3x mof 45°, rond 50mm 14. 2 Ballofix kogelafsluiters 15. Opzetbeluchter rond 50mm 16. Rubbermanchet 30/40mm 17. Mc Alpine knelsok 40mm |
|---|---|

H= voor particulieren: hoogte van het stoma vanaf de vloer minus 10 à 12cm

H= voor stomapoliklinieken, ziekenhuizen en andere instellingen: 80 à 85cm


Opmerkingen:

- de stomatoilettafel m.b.v. kit vastzetten op de consoles; niet schroeven!
- de afvoerplug niet te strak aandraaien! Rubber ring onder de wastafel monteren ! Plug afkitten in wastafel.
- Onderhoud: de stomatoilettafel mag alleen met zachte zeepproducten gereinigd worden; beslist niet met bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.

SA-175 Sanmedi Stomatoilettafel opbouwcombinatie

SA-177 Schaarspiegel voor wandmontage

Stomatoilettafel, met achterinlaat

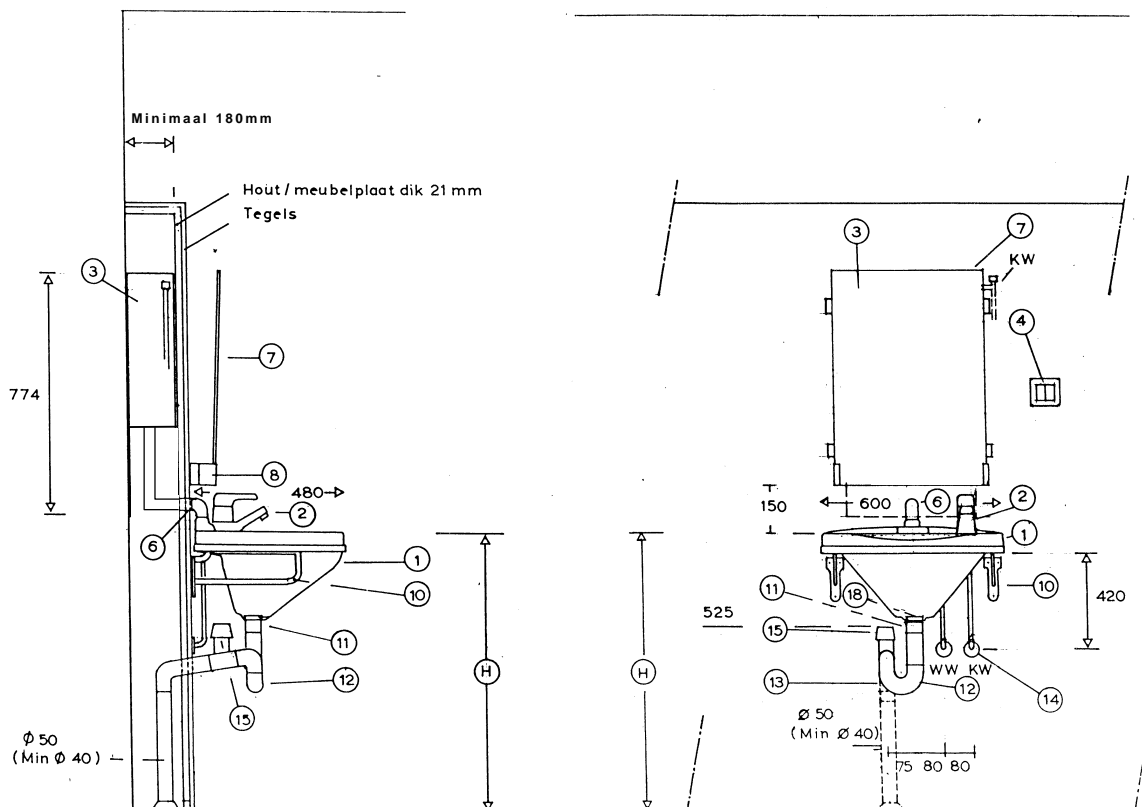

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Stomatoilet kunststof A.B.S. met toplaag, glad oppervlak dik 3mm, met boveninlaat en randspoeling 2. Eénhendel mengkraan 1/2" met doorstroombegrenzer en uittrekbare handdouche 3. Reservoir geschikt voor afstandsbediening en plaatsing achter de wand 4. Inbouwhanddrukker, pneumatisch 6. P.V.C. buis 50mm, 50cm lang grijs – P.V.C. 90° bocht 50mm grijs, - P.V.C. verloop 50/40mm grijs – P.V.C. buis 40mm, 20cm grijs – P.P.C. bocht 40mm, 90° wit 7. Spiegel rechthoekig 500x700mm 8. Kiep-spiegelgarnituur | <ol style="list-style-type: none"> 10. Een stel consoles, wit gelakt aluminium, lang 345mm 11. Kunststof plug 2", zonder rooster, zwart 12. Kunststof buissifon 2" en schuifbuis 2" 13. T-stuk met 3x mof 45°, rond 50mm 14. 2 Ballofix kogelafsluiters 15. Opzetbeluchter rond 50mm |
|--|--|

H= voor particulieren: hoogte van het stoma vanaf de vloer minus 10 à 12cm

H= voor stomapoliklinieken, ziekenhuizen en andere instellingen: 80 à 85cm

Opmerkingen:

- de stomatoilettafel m.b.v. kit vastzetten op de consoles; niet schroeven!
- de afvoerplug niet te strak aandraaien! Rubber ring onder de wastafel monteren ! Plug afkitten in wastafel.
- Meubelplaat en tegels etc. te leveren door installateur of aannemer
- Onderhoud: de stomatoilettafel mag alleen met zachte zeepproducten gereinigd worden; beslist niet met bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.

SA-176 Sanmedi Stomatoilettafel, inbouwcombinatie

SA-177 Schaarspiegel voor wandmontage

BB