

SANMEDI CIRCUMANI

6500 / 7000 / 7100 / 7500 serie

Verwarmde closetzitting met
onderdouche, föhn en geurafzuiging



OMSCHRIJVING

De SANMEDI CIRCUMANI douchewc is al ruim 30 jaar een begrip op de Nederlandse markt van aangepast sanitair. De douchewc's bieden een uitkomst voor mensen met een lichamelijke beperking waarbij het afvegen van de billen niet of moeizaam gaat. Maar het spoelen met water om het onderlichaam te reinigen is voor de persoonlijke hygiëne van iedereen aan te bevelen.

In de luxe markt is er ook vaker vraag naar dergelijke douchewc's. De verkoop van opzetsystemen die een compleet wellness-programma afwerken is het antwoord op die vraag. De douchewc van Sanmedi biedt een combinatie van deze instelmogelijkheden en speciale optionele aanpassingen, de Sanmedi Circumani. Hiermee is het opzetsysteem in veel situaties ook bruikbaar voor mensen met een beperking. De Sanmedi Circumani 6500 is het nieuwste model van de Circumani's met een vernieuwd en modern design.

Naast de vertrouwde instelmogelijkheden als:

- Anale- en vaginale reiniging met:
 - Instelbare douchearmen (naar voren of naar achteren)
 - Instelbare temperatuur van het water (van omgevingstemperatuur tot 38° C)
 - Instelbaarheid van de straalsterkte
 - Oscillerende douchestraal (heen en weer beweging voor groter bereik)
 - Zelfreinigende douchekop functie
- Instelbare föhn voor warme- of koude luchtdroging
- Geurafzuiging
- Auto functie die een programma van spoelen en drogen afwerkt
- Zitting en deksel voorzien van softclose sluiting
- Instelbare zittingverwarming
- Ecostand



is de nieuwe SA-6500 voorzien van:

- De mogelijkheid tot vastleggen van persoonlijke instellingen voor 2 gebruikers
- Een nachtlampje
- De mogelijkheid om de werking van de signalen op de afstandsbediening geluidloos te laten werken
- Een deksel die gebruikt kan worden om op te zitten (maximaal 125 kg)
- De SA-6500 is belastbaar tot 150 kg

Extra opties:

- Stabilisatieknoppen onder de zitting om schuiven van de zitting en teveel kracht op de bevestigingsscharnieren te voorkomen
- Vereenvoudigde afstandsbediening



Geschikt voor plaatsing op een sta-opstelsysteem of verticale toilet lift!

FUNCTIES

1. Infrarood zender

Stuurt een signaal vanaf de afstandsbediening naar de zitting wanneer er op een button wordt gedrukt.

2. Anale onderdouche (Rear)

Activeert de functie van de anale onderdouche.

3. Vaginale onderdouche (Front)

Activeert de functie van de vaginale onderdouche.

4. Stop knop

Stopt alle functies die op dat moment in werking zijn.

5. Oscillatie douchekopje (Move)

Activeert de heen en weer beweging van het water. Tijdens deze functie schuift de douche-arm heen en weer, waardoor een breder schoonmaak oppervlak ontstaat. Druk nogmaals op de knop om de functie te stoppen.

6. Föhn (Dry)

Zet de föhn aan die warme lucht blaast gedurende 2 minuten.

7. Föhn temperatuur en waterdruk (Water Pressure / Dry temp.)

Door de knop in te drukken tijdens het reinigen, kan de waterdruk in 3 posities worden gewijzigd. Dit geldt voor beide onderdouches. Tijdens het föhnen kan de temperatuur hoger en lager worden gezet door deze knop in te drukken.

8. Positioneren douchekopjes (Nozzle Position)

Door deze knop in te drukken kan de positie van beide onderdouches naar voren of naar achteren worden ingesteld in 7 standen.

9. Temperatuur zittingverwarming (Seat Temp)

Toont de temperatuur van de zittingverwarming. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, 32°C (blauw), 34°C (paars), 36°C (rood).

10. Straalbreedte (Spray Width)

Toont de instelling van de straalbreedte. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: smal (blauw), middel (paars) en breed (rood).

11. Watertemperatuur

Toont de instelling van de watertemperatuur. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, omgevingstemperatuur, 32°C (blauw), 35°C (paars), 38°C (rood).

12. Douchekop reiniging

De douche-armen zijn van roestvrij staal (RVS). Dit is een antibacterieel materiaal. Het is 100% chemisch- en onderhoudsvrij en houdt de douchekopjes hygiënisch en vrij van roest.

13. Geurafzuiging (Deodorizer)

Verwijdert geurtjes door lucht af te blazen van de toiletpot, via een vervangbaar koolstoffilter.

14. Vaste instellingen gebruiker 1 (User Memory 1)

Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 1e gebruiker

15. Auto modus (Auto Mode)


Door deze knop in te drukken treedt een voor ingesteld programma in werking

16. Vaste instellingen gebruiker 2 (User Memory 2)

Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 2e gebruiker



Vaginale en anale onderdouche

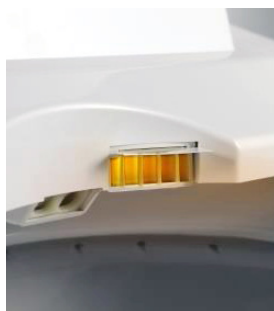

Instelbare warme luchtdroging



Verwarmde zitting



Geurafzuiging



Nachtverlichting

TECHNISCHE GEGEVENS


Elektrische aansluiting	220 - 240V
Aansluitwaarde	-
Standby waarde	-
Spanning	220 - 240 V, 50Hz
Energieverbruik	1.200 W
Netsnoer	2 mtr
Watertemperatuur	koud/laag: 32 °C - medium: 35 °C - hoog: 38 °C, regelbaar
Warmeluchttemperatuur	uit/laag/medium/hoog regelbaar
Zittingtemperatuur	koud/laag: 32 °C - medium: 35 °C - hoog: 37,5 °C, regelbaar
Watersaansluiting	links 3/8", flexibele slang 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2" afsluiter bijgeleverd en keerklep
Waterdruk	toepassingsgebied 1 - 10 bar
Watertoevoer	1.5 - 100 psi
Kleur	wit
Gewicht	5,9 kg
Richtlijnen	laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3
Drinkwaterbeveiliging	speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid
Omgevingstemperatuur	5 - 40 °C

Voor plaatsing dient een geaard stopcontact en een watersaansluiting aanwezig te zijn.


MAATVOERING

Voor een goede aansluiting van de Circumani 6500 dient er rekening gehouden te worden met onderstaande maten. De Circumani 6500 serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van het keramiek.

Standaard uitvoering

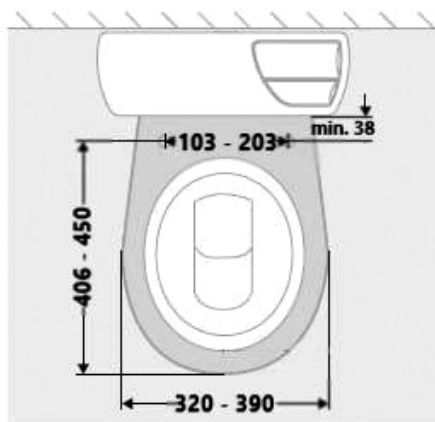

Verlengde uitvoering

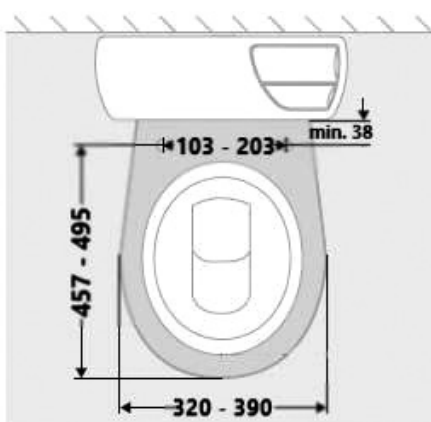

OMSCHRIJVING

De SANMEDI CIRCUMANI USPA is een hygiënische closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging voor montage op de (bestaande) closetpot. Een uitkomst voor diegenen die bij de stoelgang het normale gebruik van de handen missen, een andere lichamelijke beperking hebben of die zonder gebruik te maken van toiletpapier het onderlichaam willen reinigen.

De Sanmedi Circumani Uspa past nagenoeg op elke closetpot, zowel op closets met standaard hoogte als op '+6' of '+10' closets. De Sanmedi Circumani is spatwaterdicht. Ook de uitvoering met een verlengde zitting past op veel standaard toiletpotten, maar er is tevens een combinatie leverbaar van een design verlengd wandcloset. De Sanmedi Circumani Uspa is ook te combineren met de Sanmedi sta-op toiletlift!

De Sanmedi Circumani Uspa serie vult het assortiment douchewc's aan van Sanmedi bv, waarbij veiligheid, comfort, functionaliteit en betrouwbaarheid elkaar weer treffen. Sanmedi bv biedt ook de mogelijkheid van service aan huis.

Functies:

- Anale en vaginale onderdouche
- Instelbare positie, straalsterkte van de onderdouche
- Instelbare heen-en-weergaande douchekop voor een groter bereik
- Instelbare pulserende massagestraal
- Instelbare water- en luchttemperatuur
- Geurafzuiging en föhn met afdekklepje
- Bedieningspaneel, afstandsbediening met display of tiptoetsafstandsbediening
- Vereenvoudigde afstandsbediening met "sequencefunctie" optioneel leverbaar voor de SA-7100+
- Herkenningsoog ('zittingcontact')
- Zitting en deksel met 'soft close' demping
- Krachtige douche-straal
- Voldoet aan de Kiwa-eisen
- Closetzitting met spatrand
- Speciale instelling voor kinderen mogelijk
- De elektronica van de SA-7100+ is achter de zitting geplaatst, hierdoor zijn toiletsteunen optimaal toe te passen
- Instelbare verwarmde closetzitting
- Verschillende toiletzittingen (standaard, verlengd of U-vorm) mogelijk voor een betere pasvorm op de toiletspot; zie paslijst!



SA-7000+



SA-7100+

FUNCTIES

De **zitting** heeft een hygiënische, vlakke onderkant: het schoonmaken is hierdoor eenvoudig. De **verwarmde zitting** (van kamertemperatuur tot 40°C instelbaar) van de Sanmedi Circumani Uspa 7000+ verhoogt de closetpot 3 cm aan de voorzijde en 4 cm aan de achterkant. De zitting en deksel hebben een **softclose** werking, waarbij de zitting en deksel geremd omlaag komen. De zitting is voorzien van een **spatrand**, waardoor opspattend water of urine minder snel tussen de opening door zal komen. Het **herkenningsoog** is in de zitting verwerkt.

Het reinigen van het onderlichaam gebeurt door middel van 2 aparte **onderdouches**: **anale en vaginale spoeling**. Deze zijn instelbaar tot 40 °C. Het water wordt verwarmd door een ingebouwde boiler die onbeperkt verwarmd water geeft. De ingebouwde drukregelaar zorgt voor een constante waterdruk.

De **onderdouche** heeft 5 uitstroomopeningen met **verstelbare straalsterkte**. Het automatisch uitschuifbare douchekopje reinigt zichzelf vóór en na gebruik.

Tevens kan de onderdouche zo worden ingesteld, dat deze heen-en-weer (oscillatie) bewegingen maakt (voor een groter bereik). De positie van de onderdouche kan eenvoudig naar achteren en naar voren worden veresteld. Dit bevordert de stoelgang (clismatische werking)

De **vaginale onderdouche** wordt apart van de anale onderdouche geactiveerd. Temperatuur, straalsterkte en positie zijn ook hier regelbaar.

De temperatuur van deze zeer krachtige **föhn** is instelbaar tot maximaal 40 °C. Druk op de föhnknop als de onderdouche is gestopt en de föhn zal 3 minuten warme lucht blazen. Dit kan worden verlengd door nogmaals op de knop te drukken. Stoppen met föhnen kan via de stopknop of door op te staan van de zitting.

Na het zitten gaan, start de **geurafzuiging** automatisch na 4 tot 6 seconden, met een maximum van 20 minuten. De geurafzuiging stopt automatisch 60 seconden na het opstaan van de zitting. Nare luchtjes worden opgevangen in een vervangbaar koolstoffilter.

De knop **kids** kan worden ingedrukt om speciaal voor kinderen ingestelde functies te activeren, let op: het zittingcontact wordt hierbij uitgeschakeld.

De uitvoering **7100+** wordt bediend door middel van een afstandsbediening. Het toetsenpaneel naast de zitting vervalt dan. Deze afstandsbediening kan worden vervangen door een vereenvoudigde afstandsbediening met "sequence-functie", waarbij het programma, van spoelen tot föhnen, d.m.v. één druk op de knop in werking wordt gezet.



Verwarmde zitting



Softclose werking



Zitting met spatrand




Föhn met klepje



Dubbele onderdouche



Instelbare straalsterkte

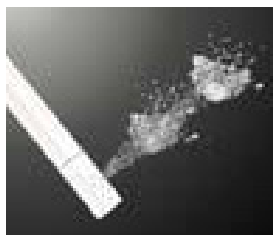

Pulserende beweging



Geurafzuiging



Vereenvoudigde afstandsbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	220 - 240V / 50 - 60Hz
Aansluitwaarde	860 - 1020W
Netsnoer	1,8 m

Water:

Watertoevoer	Direct aangesloten op de waterleiding
Watertemperatuur	Leidingwatertemperatuur tot 40°C, regelbaar
Capaciteit verwarming	220 - 240V / 800 - 952W
Wateraansluiting	links 3/8", flexibele slang 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter bijgeleverd
Waterdruk	toepassingsgebied 1,0 - 6,9 bar
Water toevoer	900 + 100 ml / min.
Tankinhoud	800 ml

Föhn:

Warmeluchttemperatuur	kamertemperatuur tot 60°C, regelbaar
Capaciteit verwarming	220 - 240V / 280 - 333W

Zitting:

Zittingtemperatuur	kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar
Capaciteit verwarming	220 - 240V / 55 - 65W

Geurafzuiging:

Kleur	katalytisch filter
Gewicht	wit
	4,4 kg

ALGEMEEN

De Sanmedi Circumani Uspace dient te worden gebruikt overeenkomstig het doel waar deze voor is gemaakt: het reinigen en drogen van het onderlichaam. Oneigenlijk of extreem gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat. Sanmedi bv stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

SYMBOLLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN





RICHTLIJNEN

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3.

Drinkwaterbeveiliging: speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.

MAATVOERING

Voor een goede aansluiting van de Circumani Uspa dient er rekening gehouden te worden met een minimale lengte van de voorzijde tot de achterzijde van de toiletpot van 545 mm, verkorte (wand)closets zijn hierdoor nooit toepasbaar. De Circumani Uspa serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van het keramiek.

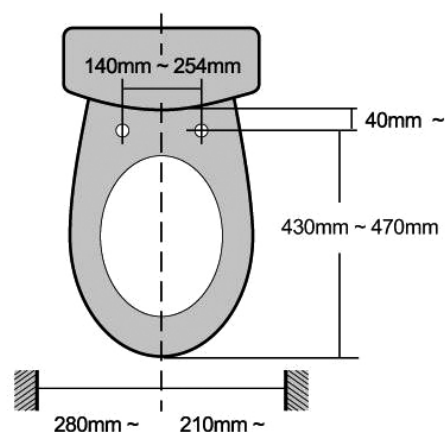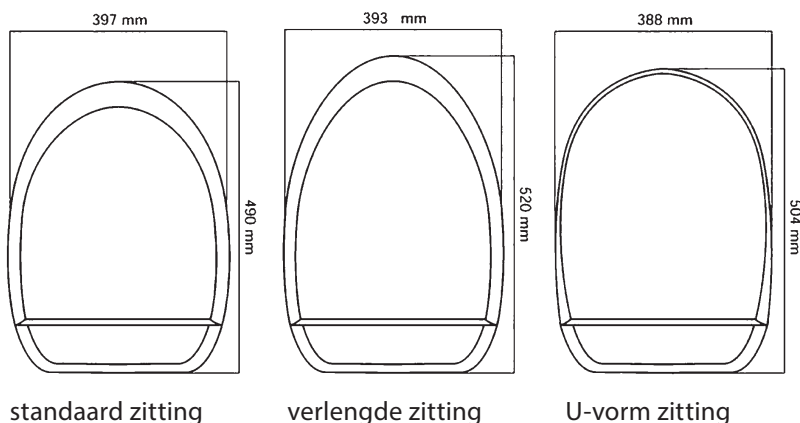

VOORSCHRIFTEN

Veiligheid is belangrijk!

Aangezien in badkamers en doucheruimten door het samengaan van water en elektrische stroom gevaar kan optreden, gelden voor deze ruimten speciale veiligheidsvoorschriften.

De veiligheidsnormen volgens DIN 57100 deel 701 / VDE 0100 deel 701 moeten worden aangehouden. In DIN 57100 deel 701 zijn deze voorwaarden vastgesteld. De beschrijving toont de aparte veiligheidsnormen met de overeenkomstige voorwaarden voor de badkamer.

- In zone 0, 1 en 2 zijn stopcontacten, ook in spiegelkasten of verlichting, niet toegestaan.
- De Circumani mag 60 cm, gemeten vanaf de buitenwand van de douchehoek of de badwand, geplaatst worden. Er dient altijd 60 cm vrije ruimte te zijn tussen douche- of badwand en de Circumani. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.
- Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.
- Deze bepalingen gelden zowel voor nieuw in te richten ruimten als ook voor renoverings- en uitbreidingswerkzaamheden.

PASLIJST

MERK	MODEL	WAND-HANGEND	STAAND	BIJZONDERHEDEN
IDEAL STANDARD	IS EUROVIT CLOSET/V AO WIT V313101		PAST	
	IS EUROVIT WANDCLOS 48 WIT		PAST NIET	Verkort model.
JIKA	JIKA CLOSET AO 4GAT WIT		PAST	
	JIKA CLOSET PK 4GAT WIT		PAST	
	JIKA EUROL WANDCLOS/D CMP WIT	PAST		
	JIKA EUROL WANDCLOS/D WIT	PAST NIET		Te korte pot en oplopende rand achter.
KERAMAG	KRMG FONDO WANDCLOSET/D WIT	PAST		
SANIBASE		PAST	PAST	
SPHINX	SPH 300 WANDCLOSET/D 22 WIT	PAST		Past niet mooi !! Het ronde gedeelte loopt 1 tot 1,5 cm buiten de pot. Buffers steunen goed. Plasrandje zit perfect aan de binnenzijde.
	SPH 300 CLOSET/D 94PK WIT		PAST	
	SPH 300 CLOSET/D 94SV WIT		PAST	
	SPH 300 CLOSET/V 96AO WIT		PAST	
	SPH 300 CLOSET/V 96PK WIT		PAST	
	SPH 300 CLOSET/V 96S WIT		PAST	
	SPH 300 DUOCLOSET 54AO WIT		PAST	
	SPH 300 DUOCLOSET 54PK WIT		PAST	
	SPH 300 WANDCLOSET/D RIMFREE W	PAST		
	SPH 300 WANDCLOSET/V 48 WIT	PAST NIET		
	SPH 300/C CLOSET/V 84AO +10 WT		PAST	
	SPH 300/C CLOSET/V 84PK +10 WT		PAST	
	SPH 300/C CLOSET/V 93AO +6 WIT		PAST	
	SPH 300/C CLOSET/V 93PK +6 WIT		PAST	
	SPH 345 WANDCLOSET WIT	PAST NIET		Oplopend randje achter.
	SPH E-CONII WANDCLOSET WIT	PAST		Het ronde gedeelte loopt 1 tot 1,5 cm buiten de pot. Buffers steunen goed. Plasrandje zit perfect aan de binnenzijde.
VILLEROY & BOCH	V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W	PAST		
	V&B O.NOVO/C WANDCL DPSP WT	PAST NIET		Te korte pot en opstaande rand achter.
	V&B O.NOVO PACK CL+ZT+RES AO W		PAST	
	V&B O.NOVO PACK CL+ZT+RES PK W		PAST	
	V&B O.NOVO PACK WANDCL+ZIT WIT	PAST		
	V&B OMNIA-CLA WNDPSPCLOSET PER	PAST		
	V&B OMNIA-CLA/C DPSPWANDCL 49 WI	PAST NIET		
	V&B OMNIA-PRO DPSPWANDCL 7623 W	PAST		
	V&B OMNIA-PRO DPSPWANDCL 7623 W	PAST		Alleen met speciale bouten.
VENLO	VENL NIMBUS CLOSET AO WIT		PAST	Past, maar langs recht gedeelte links en rechts over 10 cm 1 cm keramiek te zien.
	VENL NIMBUS CLOSET PK WIT		PAST	Past, maar langs recht gedeelte links en rechts over 10 cm 1 cm keramiek te zien.

OMSCHRIJVING


De SANMEDI CIRCUMANI 7500-7600 is een hygiënische closetzitting met onderdouche, föhn en vaste gebruikersinstellingen voor montage op de (bestaande) closetpot. Een uitkomst voor diegenen die bij de stoelgang het normale gebruik van de handen missen, een andere lichamelijke beperking hebben of die zonder gebruik te maken van toiletpapier het onderlichaam willen reinigen.

De Sanmedi CIRCUMANI 7500-7600 past nagenoeg op elke universeel gevormde toiletspot met vlakke bovenzijde van het keramiek. De Sanmedi CIRCUMANI is spatwaterdicht. De Sanmedi CIRCUMANI 7500-7600 is ook te combineren met de Sanmedi sta-op toiletlift!

De Sanmedi CIRCUMANI 7500-7600 serie vult het assortiment douchewc's aan van Sanmedi bv, waarbij veiligheid, comfort, functionaliteit en betrouwbaarheid elkaar weer treffen. Sanmedi bv biedt ook de mogelijkheid van service aan huis en het afsluiten van een onderhoudscontract.

Funcities:

- Anale en vaginale onderdouche
- Instelbare positie, straalsterkte van de onderdouche
- Instelbare heen-en-weergaande douchekop voor een groter bereik
- Instelbare pulserende massagestraal
- Instelbare water- en luchttemperatuur
- Geurafzuiging en föhn met afdekklepje
- Bedieningspaneel, afstandsbediening met drukknoppen of zijpaneel
- Herkenningsoog ('zittingcontact')
- Zitting en deksel met 'soft close' demping
- Krachtige douche-straal
- Voldoet aan de Kiwa-eisen
- Closetzitting met spatrand
- Speciale instelling voor kinderen mogelijk
- Instelbare verwarmde closetzitting

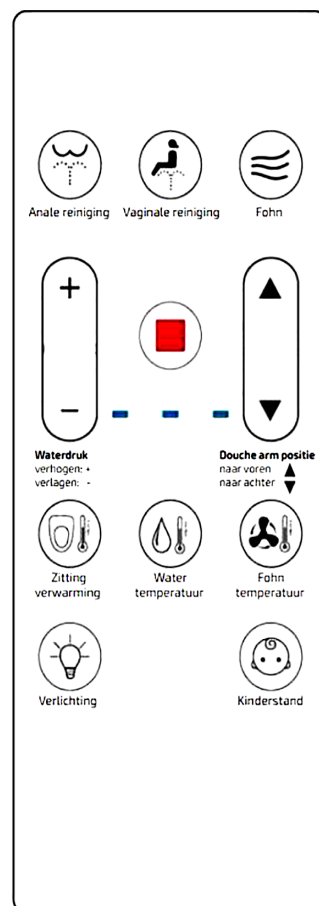

FUNCTIES

1. Infrarood zender

Stuurt een signaal vanaf de afstandsbediening naar de zitting wanneer er op een button wordt gedrukt.

2. Anale onderdouche (Rear)

Activeert de functie van de anale onderdouche.

3. Vaginale onderdouche (Front)

Activeert de functie van de vaginale onderdouche.

4. Stop knop

Stopt alle functies die op dat moment in werking zijn.

5. Oscillatie douchekopje (Move)

Activeert de heen en weer beweging van het water. Tijdens deze functie schuift de douche-arm heen en weer, waardoor een breder schoonmaak oppervlak ontstaat. Druk nogmaals op de knop om de functie te stoppen.

6. Föhn (Dry)

Zet de föhn aan die warme lucht blaast gedurende 2 minuten.

7. Föhn temperatuur en waterdruk (Water Pressure / Dry temp.)

Door de knop in te drukken tijdens het reinigen, kan de waterdruk in 3 posities worden gewijzigd. Dit geldt voor beide onderdouches. Tijdens het föhnen kan de temperatuur hoger en lager worden gezet door deze knop in te drukken.

8. Positioneren douchekopjes (Nozzle Position)

Door deze knop in te drukken kan de positie van beide onderdouches naar voren of naar achteren worden ingesteld in 7 standen.

9. Temperatuur zittingverwarming (Seat Temp)

Toont de temperatuur van de zittingverwarming. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, 32°C (blauw), 34°C (paars), 36°C (rood).

10. Straalbreedte (Spray Width)

Toont de instelling van de straalbreedte. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: smal (blauw), middel (paars) en breed (rood).

11. Watertemperatuur

Toont de instelling van de watertemperatuur. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, omgevingstemperatuur, 32°C (blauw), 35°C (paars), 38°C (rood).

12. Douchekop reiniging


De douche-armen zijn van roestvrij staal (RVS). Dit is een antibacterieel materiaal. Het is 100% chemisch- en onderhoudsvrij en houdt de douchekopjes hygiënisch en vrij van roest.

13. Geurafzuiging (Deodorizer)

Verwijdert geurtjes door lucht af te blazen van de toiletpot, via een vervangbaar koolstoffilter.



Vaginale en anale onderdouche

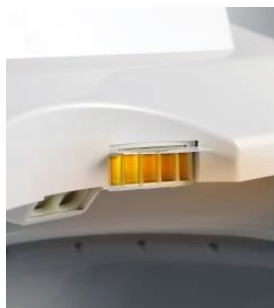

Instelbare warme luchtdroging



Verwarmde zitting



Geurafzuiging



Nachtverlichting

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektra

Elektrische aansluiting	230 V
Aansluitwaarde	1030-1270 W
Netsnoer	1,5 m

Water

Watertoevoer	direct aangesloten op de waterleiding
Watertemperatuur	regelbaar 4 niveaus
Capaciteit verwarming	230 V / 1250 W
Wateraansluiting	links 3/8", flexibele slang 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2" afsluiter bijgeleverd en keerklep
Drinkwaterbeveiliging	speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleiding technische veiligheid.
Waterdruk	0,7 - 8 bar
Tankinhoud	200 ml
Veiligheid	zekering ter voorkoming van oververhitting

Föhn

Warmeluchttemperatuur	regelbaar 4 niveaus
Capaciteit verwarming	250 W
Veiligheid	zekering ter voorkoming van oververhitting

Zitting

Zittingtemperatuur	regelbaar 4 niveaus
Capaciteit verwarming	230 V / 50 W
Deksel	soft close
Kleur	wit

Algemeen

Nachtlampje	uitschakelen mogelijk
Gebruikersinstellingen	instellingen per gebruiker vast te houden
Ontstoring	de 7500/7600 closetzittingen zijn radio- en tv onststoord

De Sanmedi Circumani 7500/7600 dient te worden gebruikt overeenkomstig het doel waar deze voor is gemaakt: het reinigen en drogen van het onderlichaam. Oneigenlijk of extreem gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat. Sanmedi bv kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

SYMBOLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN



Richtlijnen Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3.

VOORSCHRIFTEN

In doucheruimtes en badkamers mogen elektrische apparaten volgens VDE 0100, del 701 en SEV 1000-2: 1995 alleen in beschermingsgebied 3 worden geïnstalleerd. Dit houdt in dat er tussen de Circumani 7500 en de buitenwand van de douchehoek of de badwand tenminste 60 cm vrije ruimte dient te zijn. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm. Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog. Deze bepalingen gelden zowel voor nieuw in te richten ruimte als ook voor renoverings- en uitbreidingswerkzaamheden.


De bouwkundige elektrische installatie mag uitsluitend door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Vóór plaatsing dient een geaard stopcontact binnen 1,4 meter van het apparaat aanwezig te zijn alsmede een wateraansluiting. In DIN 57100 deel 701 zijn deze voorwaarden vastgesteld. De beschrijving toont de aparte veiligheidsnormen met de overeenkomstige voorwaarden voor de badkamer. In zone 0, 1 en 2 zijn stopcontacten, ook in spiegelkasten of verlichting, niet toegestaan.


MAATVOERING

Voor een goede aansluiting van de Circumani 7500/7600 dient rekening gehouden te worden met een minimale lengte van de voorzijde tot de achterzijde van de toiletpot van 510 mm.

De SA-7500/7600 serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van het keramiek.

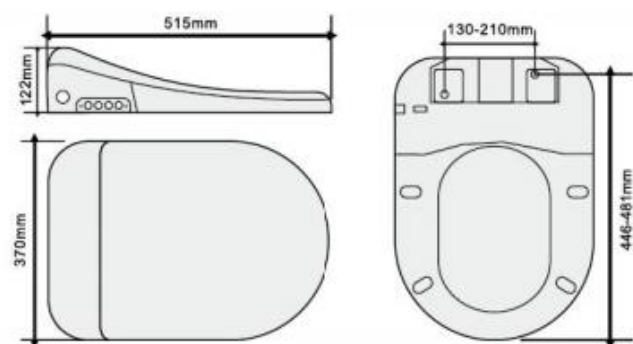

SA-7500

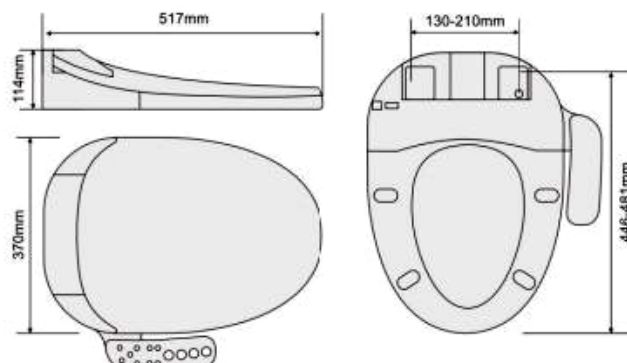

SA-7600

