

USPA 7000 & 7100

Installatiehandleiding & gebruiksaanwijzing



1.	INSTALLATIE	3 - 7
1.1	Vorbereiding	3 - 4
1.2	De installatie	5 - 7
2.	GEBRUIKSAANWIJZING	8 - 13
2.1	De pictogrammen	8 - 9
2.2	Afstandsbediening	10
2.3	Schoonmaak en onderhoud	11
2.4	Storingen	12
3.	GARANTIE	13



VOOR INSTALLATIE


De Sanmedi Circumani Uspa closetzitting zorgvuldig uitpakken en onderdelen op mogelijke beschadiging controleren. In geval van beschadigingen niet installeren, maar per omgaande / dezelfde dag bij uw leverancier schriftelijk melden. Zonder bewijs van schriftelijke melding kan geen vervanging / omwisseling plaatsvinden.


DE LEVERING OMVAT

De Sanmedi Circumani Uspa closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Basiseenheid met knoppenpaneel, verwarmingselement, onderdouche, föhn, geurafzuiging, elektronische besturing en ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen die voldoet aan de Kiwa-eisen voor waterleidingtechnische veiligheid.
- Verwarmde zitting met spatrand en deksel
- Afstandsbediening met drie batterijen AAA
- Flexibele aanvoerslang (inkortbaar)
- Keerklep
- Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer + vuilfilter
- Standaard bevestigingsset en een extra set kunststof bevestigingsbouten
- 2 reserve zittingbuffers
- Geurfilter
- Installatie- en gebruikershandleiding

Overhandig – na montage en uitleg over de werking – de gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.

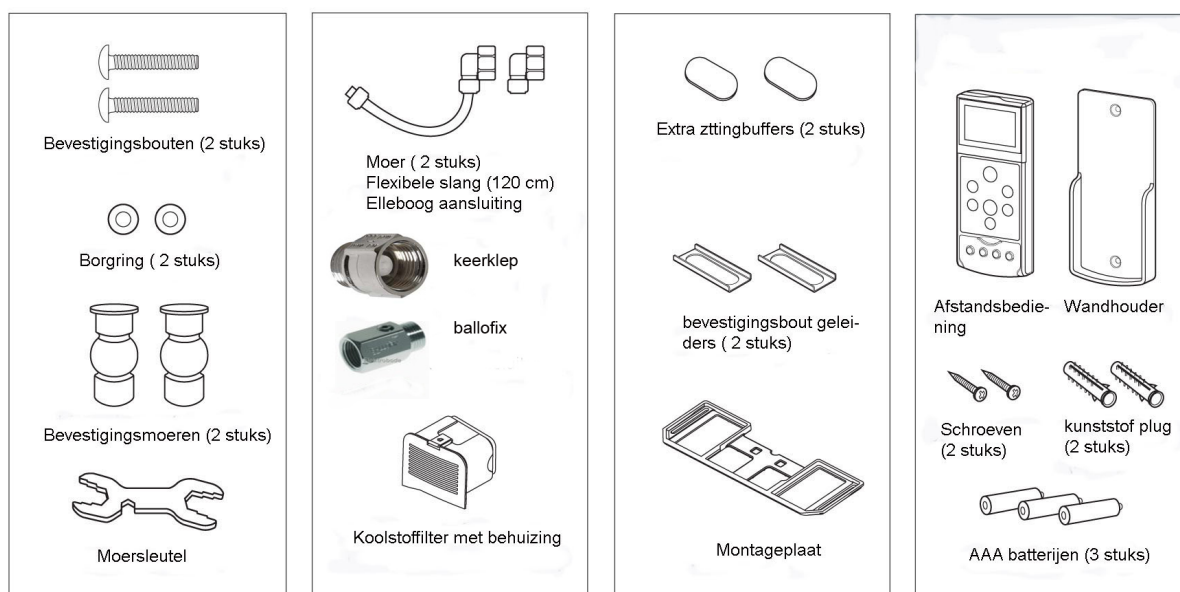

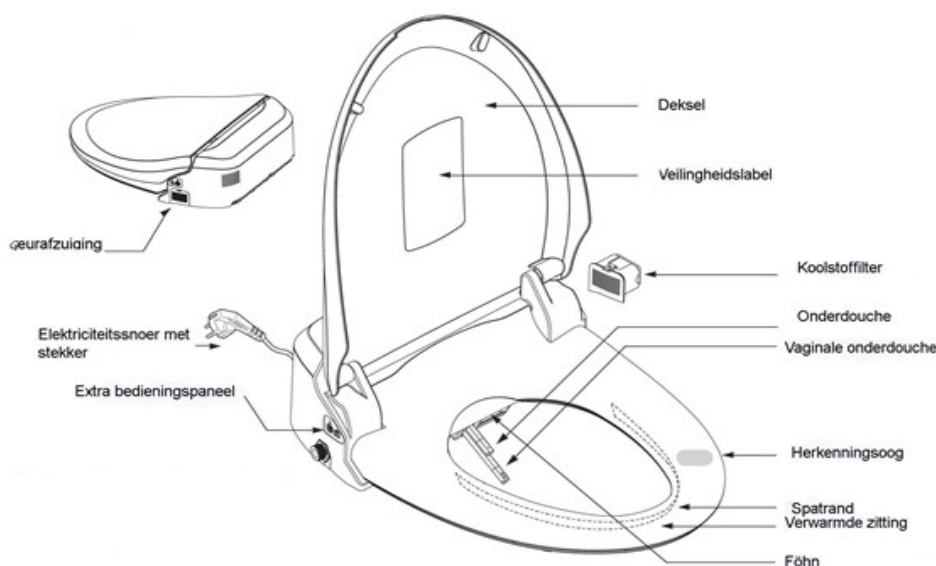

VOOR INSTALLATIE

In doucheruimten en badkamers mogen elektrische apparaten volgens VDE 0100, del 701 en SEV 1000-2, 1995 alleen in beschermingsgebied 3 worden geïnstalleerd.


- Dit houdt in dat er tussen de Circumani Uspa 7000+ en de buitenwand van de douchehoek of de badwand tenminste 60 cm vrije ruimte dient te zijn. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm. Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.
- De bouwkundige elektrische installatie mag uitsluitend door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Voor plaatsing dient er een geaard stopcontact binnen 1,4 meter van het apparaat aanwezig te zijn en een wateraansluiting.
- In DIN 57100 deel 701 zijn deze voorwaarden vastgesteld.
- De beschrijving toont de aparte veiligheidsnormen met de overeenkomstige voorwaarden voor de badkamer.

- ✓ In zone 0, 1 en 2 zijn stopcontacten, ook in spiegelkasten of verlichting, niet toegestaan.
- ✓ De Circumani mag 60 cm, gemeten vanaf de buitenwand van de douchehoek of de badwand, geplaatst worden. Er dient altijd 60 cm vrije ruimte te zijn tussen douche- of badwand en de Circumani. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.
- ✓ Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.
- ✓ Deze bepalingen gelden zowel voor nieuw in te richten ruimten als ook voor renoverings- en uitbreidingswerkzaamheden.

MAATVOERING



Voor een goede aansluiting van de Circumani Uspa dient er rekening gehouden te worden met een minimale lengte van de voorzijde tot de achterzijde van de toiletpot van 490 mm.

De Circumani uspa serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van het keramiek.

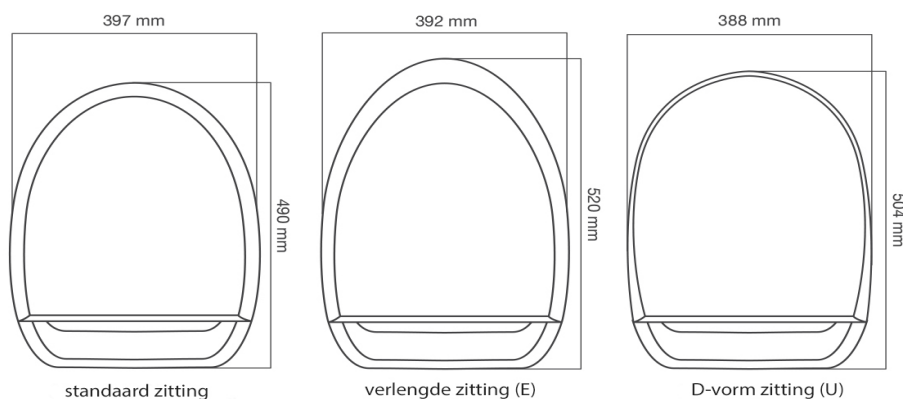

INSTALLATIE

1. Plaats de Circumani Uspa op de toiletpot en markeer de achterzijde op de toiletpot, zie tekening.
2. Monteer de bijgeleverde montageplaat, met een ruimte van 5 mm van het gemarkeerde met de daarbij behorende bevestigingsmaterialen. Zorg dat deze goedgecentreerd is.
3. Wij adviseren om de kunststof bouten te gebruiken voor extra stevigheid. Alleen bij verzonken (diepe) en onbereikbare bevestigingsgaten in de toiletpot kunnen de standaard bouten worden toegepast.
4. Plaats de 220 volt kabel in de kabelgoot (links of rechts, afhankelijk van de plaatsing stopcontact) en schuif de Circumani Uspa over de montageplaat heen (van voor naar achter). Controleer of deze goed vast zit. Indien nodig kan Circumani Uspa uitgebouwd worden door middel van de voorzijde van de behuizing 2 cm op te tillen en vervolgens het apparaat naar voren te schuiven.

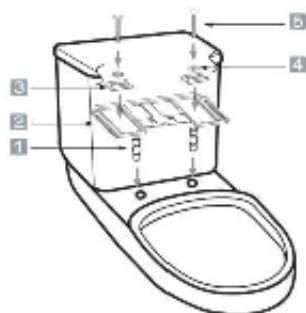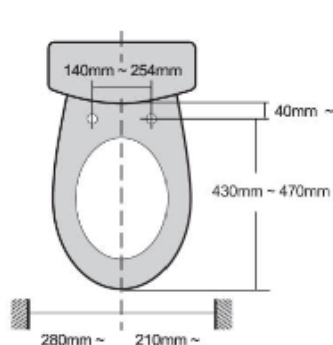

1. Moer, 2. Montageplaat, 3. Geleideplaat, 4. Sluistring, 5. Bout




Herkenningsoog:

In de zitting zit een herkenningsoog verwerkt, de Sanmedi Circumani Uspa zal niet werken zolang er niemand op zit. Dit zittingcontact kan ook worden verkregen door een hand (nat wc papiertje) over het herkenningsoog te plaatsen.

EXTRA ZITTINGBUFFERS

Indien de zitting niet goed aansluit op het keramiek kan het gebruik van de meegeleverde extra zittingbuffers uitkomst bieden. Plaats deze over de bestaande buffers.

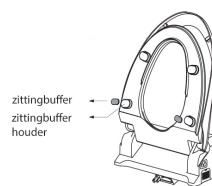


INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Plaatsen van de batterijen:

1. Open het klepje van de afstandsbediening en plaats de 3 meegeleverde AAA batterijen in het compartiment.
2. Controleer of de display oplicht.
3. Controleer of de zitting reageert op de afstandsbediening terwijl er een zittingcontact wordt gemaakt.
4. Bevestig de houder op de wand.

Note:

- Gebruik alleen 3 AAA batterijen, geen oplaadbare.
- Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk en alleen van hetzelfde type.
- Als het apparaat langere tijd niet in gebruik is, haal de batterijen uit de afstandsbediening.
- Vervang de batterijen als het LCD schermje vervaagd.
- De instellingen gaan verloren bij het wisselen van de batterijen, deze moeten opnieuw ingesteld worden.

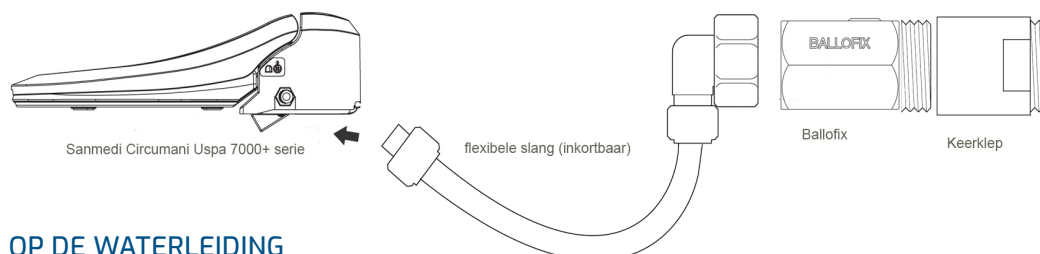

AANSLUITEN OP DE WATERLEIDING

Sluit de Sanmedi Circumani Uspa aan op de waterleiding met behulp van de keerklep, ballofix en flexibele aanvoerslang (Let op, niet aansluiten op de warm waterleiding), zoals aangegeven in bovenstaande tekening. De keerklep wordt aangesloten op de waterleiding die uit de muur komt, daarna de ballofix en vervolgens de flexibele slang die aan de andere zijde aan het apparaat wordt gekoppeld.

Note:

- Voor het aansluiten van de flexibele aanvoerslang op de waterleiding dient eventueel een t-stuk te worden geplaatst op het pijpje dat naar het reservoir van de closetpot loopt. Spoel na evt. solderen eerst de leiding goed schoon. Indien bij het solderen van de leiding soldeer-resten of ander vuil in de leiding komen, zal de magneetafsluiter niet meer afsluiten, met als gevolg dat er water uit de onderdouche zal lekken. Er dient dan contact opgenomen te worden met een servicemonteur van Sanmedi bv om dit probleem te verhelpen.
- Wanneer de wateraansluiting achter de wand ingebouwd wordt, dient de ballofix afsluiter vòòr de wand geplaatst te worden, zodat het water gemakkelijk kan worden afgesloten voor servicewerkzaamheden.
- Draai de watertoevoer open van de leiding en de ballofix.



INSTELLEN VAN DE AFSTANDBEDIENING

De aansluitkabel is 1.4 m lang. Er dient een geaard stopcontact te worden toegepast. Het stopcontact moet zo gesitueerd zijn, dat:

- Aan de voorwaarden van het plaatselijke / regionale elektriciteitsbedrijf wordt voldaan.
- Zo mogelijk de bijgeleverde aansluitkabel wordt gebruikt. Indien dat niet mogelijk is, de bijgeleverde aansluitkabel door een elektricien laten vervangen door een aansluitkabel van de juiste lengte.

Let op: In verband met toekomstig onderhoud dient de Circumani altijd d.m.v. een stekker te worden aangesloten op het stroomnet.

Eventueel te verrichten elektrische installatie dient door de erkende elektricien te worden gedaan respectievelijk te worden gecontroleerd.

Steek de stekker in het stopcontact. Let op: doe dit alleen als er waterdruk op het apparaat staat!

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting 220 - 240V / 50 - 60Hz

Aansluitwaarde 860 -1020W

Netsnoer 1.4 m

Water

Watertoevoer Direct aangesloten op de waterleiding

Watertemperatuur Kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar

Capaciteit verwarming 220 - 240V / 800 - 952W

Wateraansluiting Links 3/8", 1 m. flexibele slang (eenvoudig inkortbaar) 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter en keerklep bijgeleverd

Waterdruk Toepassingsgebied 1.0 - 6,9 bar

Water toevoer 900 + 100 ml / min.

Tankinhoud 800 ml

Föhn

Warmeluchttemperatuur Kamertemperatuur tot 60°C, regelbaar

Capaciteit verwarming 220 - 240V / 280 - 333W

Zitting

Zittingtemperatuur Kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar

Capaciteit verwarming 220 - 240V / 55 - 65W

Geurafzuiging Katalytisch filter

Kleur Wit

Gewicht 4,4 kg

OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN

Stop

- Gebruik de stopknop om de functie in gebruik uit te schakelen.
- De functie schakelt ook automatisch uit bij opstaan van de zitting.

Cleansing

- Druk op "Cleansing" om de onderdouche in werking te zetten. Deze stopt automatisch na 60 seconden.
- Druk nogmaals op "cleaning" om de oscillatiefunctie te activeren. Het douchekopje maakt nu een beweging van voor naar achter om het bereik te vergroten.
- Door nogmaals op de knop te drukken stopt de oscillatiefunctie.
- Indien er direct weer op "Cleansing" wordt gedrukt geeft de Uspe 7100+ opnieuw 60 seconden warm water, dit kan ongelimiteerd toegepast worden.

Bidet

- Druk op "Bidet" om de vaginale onderdouche te activeren.
- Druk nogmaals op "bidet" om de oscillatiefunctie te activeren. Het douchekopje maakt nu een beweging van voor naar achter om het bereik te vergroten.
- Door nogmaals op de knop te drukken stopt de oscillatiefunctie.

Dry

- Druk op "Dry" na gebruik van de onderdouche. De föhn blaast 3 minuten warme lucht.
- Door nogmaals op de knop te drukken kan er gewisseld tussen gewone en turbostand van de föhn.

IIP



- Druk op "IIP" om een zeer krachtige waterstraal te activeren die de stoelgang kan bevorderen.
- Na 60 seconden stopt de functie automatisch.
- Druk nogmaals op "IIP" om de pulsatie te intensiveren.

Kids

- Gebruik de "Kids" knop om alle functies geschikt te maken voor kinderen.
- Deze geeft standaard 1 minuut oscillatie en 3 minuten warm lucht, level 1 waterdruk en de douchekop wordt gepositioneerd op stand 5.
- De functie schakelt ook automatisch uit bij opstaan van de zitting.

Auto

- Druk op "auto" tijdens gebruik, "Cleansing", oscillatie, lucht toevoeging aan waterstraal volgen elkaar elke 20 seconden op. Na het reinigingsprogramma schakelt de föhn automatisch in. Indien de Dry knop wordt ingedrukt tijdens het föhnen wordt de turbostand geactiveerd en werkt de föhn optimaal.
- Als de vaginale onderdouche ook gewenst is, druk dan op "bidet" en vervolgens op "auto".

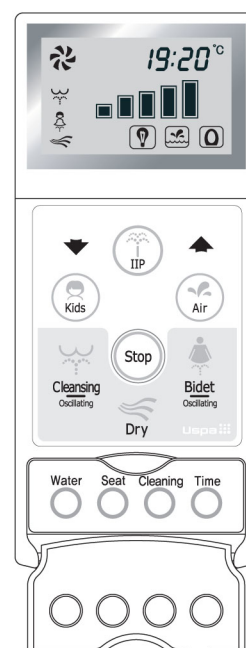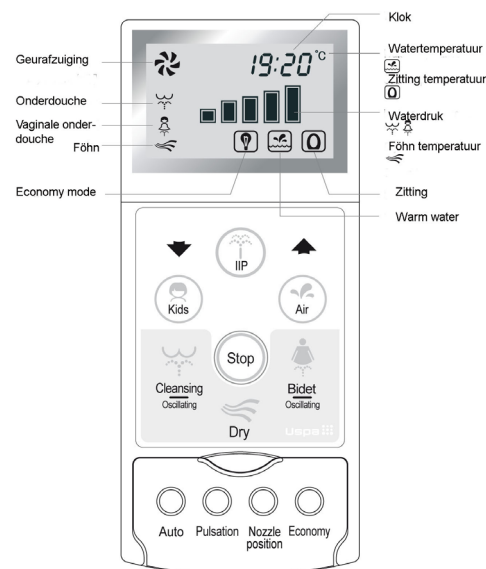

Air

- druk op "Air" tijdens gebruik van "Cleansing" of "Bidet". Water wordt vermengd met lucht waardoor de straal krachtig maar zacht aanvoelt, dit reinigt optimaal.

Pulsation

- Druk op "Pulsation" om een ritmische straal met massage-effect te activeren.
- Druk nogmaals op "pulsation" om de functie te stoppen.

Automatische geurafzuiging

- Zolang de Uspa 7100+ in gebruik is zal de geurafzuiging automatisch werken gedurende een tijd van maximaal 20 minuten.
- Bij opstaan van de zitting stopt deze geurafzuiging na 60 seconden.

Positie van de onderdouche

- De positie van de onderdouche kan in 5 standen worden ingesteld door op de Nozzle position te drukken. Met de pijlen hoog laag kan dit gewijzigd worden. Na ieder gebruik zal deze automatisch terug gaan in stand 3.

Waterdruk / föhn temperatuur

- Zowel de waterdruk als de temperatuur van de föhn is instelbaar in 5 standen. Dit kan gewijzigd worden met de pijlen tijdens spoelen/drogen. Na ieder gebruik zal deze automatisch terug gaan in stand 3.

Temperatuur instelling (water / zitting)

- De temperatuur van het water en de zitting is instelbaar in 4 standen: leidingwatertemperatuur, 34, 37 of 40 graden.

Economy

- Door op de knop "Economy" te drukken wordt de energie-spaarstand 1 uur na gebruik ingeschakeld.
- De watertemperatuur en die van de zitting is dan 30 graden Celcius, dit is zichtbaar op het display van de afstandsbediening. Op het bedieningspaneel gaat er een groen LED lampje branden naast de knop Power/Economy.
- Zodra de Uspa 7100+ in gebruik is zullen de standaard posities weer inschakelen tot een uur na gebruik.
- Door opnieuw op "Economy" te drukken schakelt de functie uit.

Zittingcontact maken!

- Plaats van de sensor t.b.v. het activeren van de functies.
- Deze is te vinden op de zitting.
- Bij het activeren van de sensor (plaats nemen op de zitting) is een bliepje hoorbaar.



Verwarmde zitting

- Na gebruik dient deze functie uitgezet te worden om te voorkomen dat de zitting continu verwarmd blijft.
- Tijdens de eco stand (groen lampje) blijft deze 1 uur aan en gaat daarna naar 30 graden. Bij normale stand (rood controlelampje) blijft de zittingverwarming aan.
- Geadviseerd wordt om de verwarming van de zitting ongeveer 10 minuten voor gebruik te activeren.

Zelfreinigend

- Voor en na gebruik van de onderdouche wordt het douchekopje automatisch gereinigd.
- In ruststand zijn beide onderdouches in teruggetrokken positie onder de zitting.

Zelfdiagnose

- Als er een probleem is zal het LED lampje van "Power" rood knipperen.
- Schakel het apparaat uit en neem contact op met uw dealer.

Let op!

De onderdouche of luchtopening, föhn of afzuiging niet besproeien met urine of verontreinigen met fecaliën.

Let op!

Laat de afstandsbediening niet in het water vallen, hierdoor kunnen functies uitvallen.

INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Plaatsen van de batterijen:

1. Open het klepje van de afstandsbediening en plaats de 3 meegeleverde AAA batterijen in het compartiment.
2. Controleer of de display oplicht.
3. Controleer of de zitting reageert op de afstandsbediening terwijl er een zittingcontact wordt gemaakt.
4. Bevestig de houder op de wand.

Note:

- Gebruik alleen 3 AAA batterijen, geen oplaadbare.
- Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk en alleen van hetzelfde type.
- Als het apparaat langere tijd niet in gebruik is, haal de batterijen uit de afstandsbediening.
- Vervang de batterijen als het LCD schermplje vervaagd.
- De instellingen gaan verloren bij het wisselen van de batterijen, deze moeten opnieuw ingesteld worden.

De optioneel te bestellen vereenvoudigde afstandsbediening is automatisch gekoppeld aan de standaard afstandsbediening. Een simpele druk op de knopjes om de juiste functie te activeren is voldoende.

IDENTIFICATIE:

- Deze functie is van belang indien er meerdere toiletten in een huis of toiletgroep zijn geplaatst met de Sanmedi Uspa.
- Om te voorkomen dat de apparaten reageren op de verkeerde afstandsbediening is het van belang dat op de afstandsbediening en de bijbehorende Sanmedi Uspa dezelfde ID wordt ingesteld.
- Dit is niet noodzakelijk met slechts 1 Sanmedi Uspa in de buurt.
- De standaard ID is ingesteld op "0", er is keuze uit de getallen 0 t/m 15.

Het instellen van de ID

Afstandsbediening:

- Houdt de "Stop" knop 5 seconden ingedrukt waarna 16:00 in het display verschijnt.
- Druk met de pijltjes omhoog of omlaag tot de gewenste ID in het display staat (0-15).
- Druk de "Stop" knop opnieuw in om de ID vast te zetten, het display komt automatisch weer in de stand-by mode.

Circumani Uspa 7100+:

- Druk op de knop "Power/Bidet" waarna gedurende 5 seconden een piep te horen is. De ID kan ingesteld worden.
- Druk op "Cleansing/Stop" tot de gewenste ID bereikt. Om 3 in te stellen dient er 3 keer gedrukt te worden.
- Druk de "Power/Bidet" knop opnieuw in om de ID vast te zetten, de Sanmedi Uspa komt automatisch weer in de stand-by mode.

Let op!

- Als er geen gelijke ID code is ingesteld op de Circumani Uspa en de afstandsbediening, zal het apparaat niet werken.
- De ID code springt terug op "0" als de stroom van het apparaat is geweest of bij vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Douchekopje:

Let op: gebruik ten alle tijden de knop "Cleaning" (zit onder het klepje) om het douchekopje te reinigen, trek of draai niet aan het douchekopje waardoor deze kan afbreken.

1. Zorg ervoor dat er geen zittingcontact wordt gemaakt. Deze is verwerkt in de zitting en treedt in werking door plaats te nemen op de zitting of door er een hand op te plaatsen.
2. Druk op de "Cleaning" knop (onder het klepje) op de afstandsbediening, waarna de onderdouches naar voren komt. Druk nogmaals op de knop "Cleaning" en ook de vaginale onderdouches komt naar voren.
3. Oefen geen harde druk uit op de onderdouches. Neem het kunststof douchekopje tussen duim en vinger, trek deze zonder te veel kracht recht naar voren eraf. Gebruik een tandenborstel of zachte doek om de onderdouches schoon te maken. Het douchekopje kan eventueel in schoonmaakazijn of -citroen worden gelegd. Als het schoonmaken langere tijd duurt, wordt aangeraden de stekker uit het stopcontact te halen.
4. Druk op "Stop" en beide onderdouches trekken zich weer terug in de stand-by modus.

Zitting en deksel


- Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.
- De zitting en deksel zijn niet vaatwasmachine bestendig.
- Maak de zitting en deksel schoon met een zachte vochtige doek.
- Droog de zitting, deksel en scharnieren na met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.

Geurafzuiging

- Verwisselen koolstoffilter: om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een jaar mee.

Batterijen vervangen

- In de display van de afstandsbediening knippert "BaLo" (battery low).
- De batterijen dienen te worden vervangen door 3 x AAA.
- Na het vervangen dient de watertemperatuur weer ingesteld te worden.

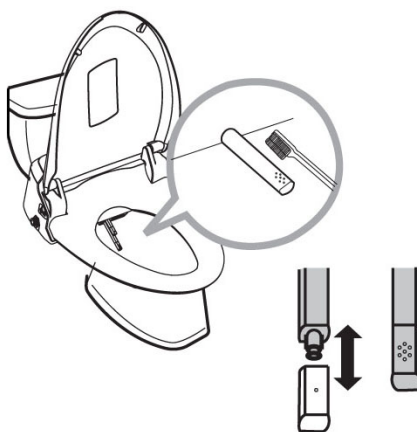

STORINGEN

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
Geen werking van het apparaat	Stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Aardlekschakelaar is uitgeslagen of stop is stuk.	Zet de knop van de aardlekschakelaar om of vervang de stop.
	Er wordt geen goed zittingcontact gemaakt.	Ga dusdanig zitten dat de gehele zitting wordt bedekt.
Apparaat geeft geen water	Hoekstopkraan of ballofix zit dicht.	Open de watertoevoer en controleer op eventuele lekkages.
	Het vuilfilter verstopt.	Reinig het vuilfilter
	De onderdouche is verstopt.	Reinig de onderdouche
Er lekt water uit het apparaat	Controleer of alle slangen en leidingen goed zijn aangesloten.	Neem contact op met uw dealer.
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen zichtbaar op het display)	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen.
	Geen batterijen aanwezig.	Stop batterijen (3 x 1,5V type LR3/AAA) in de afstandsbediening.
	Batterijen zijn verkeerd geplaatst.	Batterijen opnieuw plaatsen.
	Afstandsbediening is defect.	Vervang de afstandsbediening.
Water-, zitting- of föhn temperatuur te laag	Controleer of de instelling op "Off" staat.	Reset de temperatuur.
	Controleer of het apparaat in de economy mode staat.	Schakel de economy mode uit.

ALGEMEEN

De Sanmedi Circumani Uspa dient te worden gebruikt overeenkomstig het doel waar deze voor is gemaakt: het reinigen en drogen van het onderlichaam. Oneigenlijk of extreem gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat. Sanmedi bv stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

Ontstoring

De Sanmedi Circumani Uspa closetzittingen zijn radio- en tv-ontstoord.

GARANTIE

Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten te verhelpen.

Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met uw installateur. Bij het verhelpen van fouten onder garantie dient de klant aan de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de aankoopdatum van de Sanmedi Circumani kan controleren.

Symbolen, keurmerken en certificeringen



Richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3

